



Manuel d'utilisateur

Table des matières


Précautions	3
Aperçu	4
<i>Ouvrir la boîte et déballer les éléments</i>	4
<i>Présentation et fonctions</i>	5
<i>Sécurité et maintenance</i>	6
Mise en route	7
<i>Charge de la batterie</i>	7
<i>Lecture avec la Loupe</i>	8
Utilisation de la loupe	9
<i>Mode vidéo</i>	9
<i>Réglage de grossissement</i>	9
<i>Gel de l'image</i>	9
<i>Indication de batterie faible</i>	10
<i>Power OFF</i>	10
Raccordement de la Loupe à un téléviseur	11
Dépannage	12

Précautions


Federal Communications Commission (agence indépendante du gouvernement des Etats Unis)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.


Ouvrir la boîte et déballer les éléments

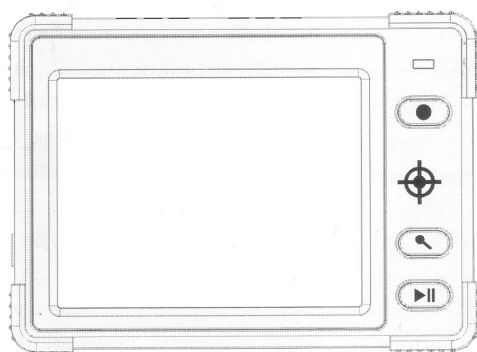

Loupe électronique Iléana

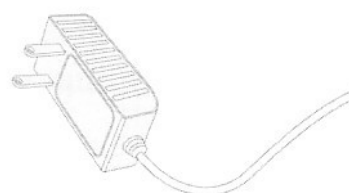


Adaptateur secteur

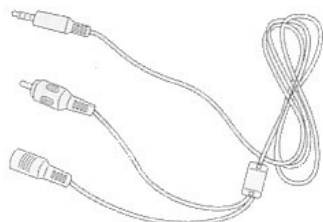


Câble vidéo
(pour la connexion à un moniteur)



Mallette de transport
avec sangle d'épaule

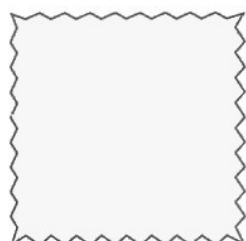


Chiffonnette

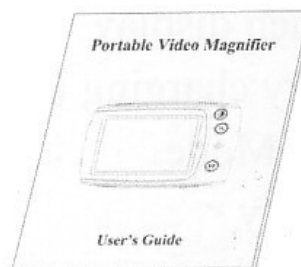

Manuel d'utilisateur

Présentation et fonctions

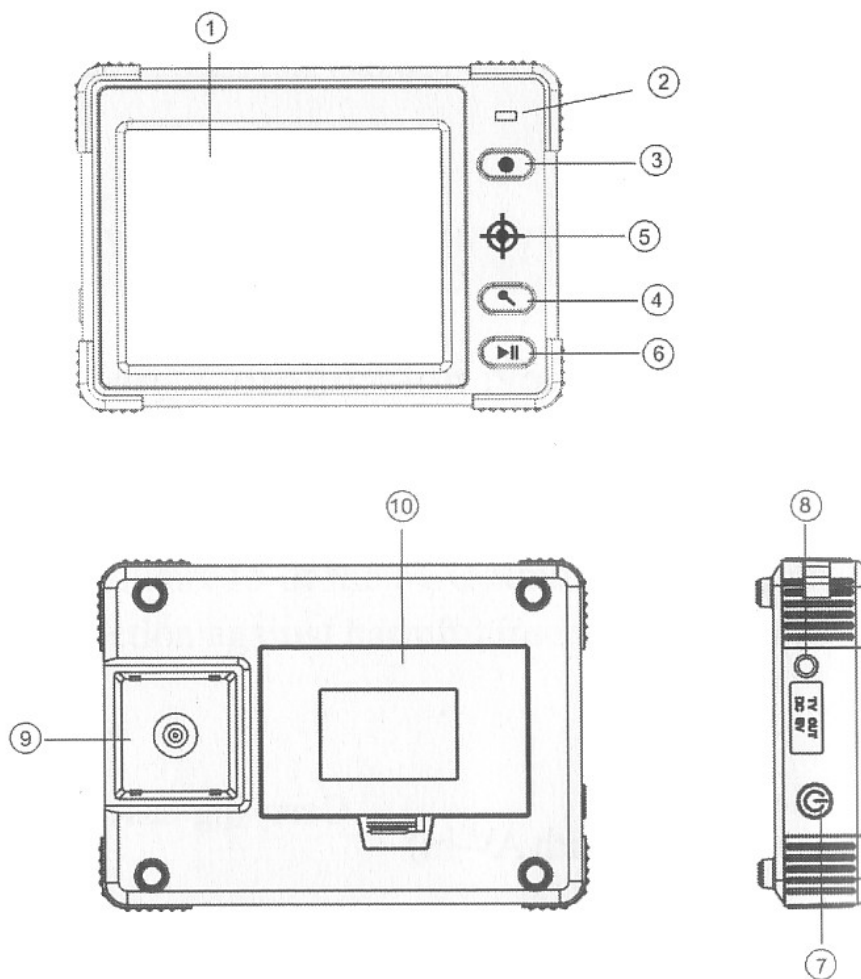

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Ecran 4.3 pouces | 6. Gel de l'image |
| 2. Témoin de charge batterie | 7. Prise Alimentation |
| 3. Mode vidéo | 8. et vidéo 8-Marche / Arrêt |
| 4. Grossissement | 9. Caméra |
| 5. cible de lecture | 10. Compartiment batterie |

Sécurité et maintenance


Pour garder votre loupe en bon état IL FAUT observer les directives suivantes:

1. Lisez les instructions dans ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne pas tenter de réparer la loupe ou d'ouvrir son boîtier. Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
3. Gardez la Loupe loin des zones humides, lumière, et d'autres sources de liquides. Ne pas immerger ni mouiller l'appareil.
4. Toujours utiliser la loupe dans un endroit où la température est comprise entre 10°C et 40°C.
5. Toujours stocker la loupe dans un endroit où la température est comprise entre 20°C et 65°C.
6. Ne pas tenter de forcer un connecteur dans les entrées des / vidéo de l'appareil du port. Connecteurs appropriés Ail devrait correspondre EASI dans le port.
7. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le loupe pour recharger la batterie. D'autres adaptateurs peuvent endommager l'appareil.

Charge de la batterie ATTENTION lisez bien ce qui suit

Avant d'utiliser la Loupe, vous devez recharger sa batterie. Jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteint, si la batterie est vide cela peut prendre plusieurs heures.

1. Branchez la petite extrémité de l'adaptateur dans le port Power / Vidéo (8) situé sur le côté gauche de l'appareil. Ensuite, branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise secteur standard. L'indicateur de batterie LED (2) sur le devant de l'appareil sera en rouge pour montrer que la batterie se recharge.

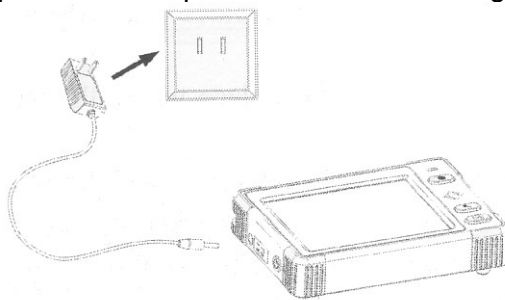

2. Lorsque la batterie est finie de charger, en général laissez 1 à 2 heures en charge jusqu'à que le LED rouge disparaîtra Débranchez l'appareil.

3. Vous pouvez maintenant utiliser votre loupe pour jusqu'à quatre heures d'utilisation continue. La loupe s'arrête au bout de 20 minutes économie d'énergie.

Lorsque la batterie est faible, il y a un indicateur  de faible puissance qui clignotera sur le coin supérieur droit du panneau.

Alors, vous devez brancher l'adaptateur secteur pour recharger la batterie.


ATTENTION : Toujours éteindre la loupe pendant que celle-ci se charge bouton 7. La batterie ne se recharge pas si la Loupe est en mode marche

Lecture avec la Loupe : La loupe fonctionne environ 20 minutes en continue après elle s'arrête (économie d'énergie) si vous voulez continuer il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton N° 7 marche/arrêt pour qu'elle se remette en marche. '


Pour lire avec la loupe, opérer comme suit:


1. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt (7) situé sur le côté gauche de l'appareil à la position ON.


2. Placer le plat Loupe contre le texte que vous voulez lire.

3. Placez le réticule  qui apparaît juste en dessous du bouton agrandir sur l'emplacement approximatif où vous voulez commencer la lecture. Tout sous cette croix est magnifié et montré à l'écran.

4. Faites glisser l'unité progressivement vers la droite pour lire à la fin de la ligne. Faites glisser l'unité vers le bas et vers la gauche pour lire la ligne suivante du texte.

5. Pour changer le niveau de grossissement, appuyez sur le bouton  agrandir

6. Pour changer les couleurs utilisées sur l'écran, appuyez sur le bouton  jaune mode Vidéo jusqu'à ce que vous trouvez le mode le mieux adapté à vos besoins de vision.


7. Pour figer l'image actuelle, appuyez sur la touche Stop / bouton Play  . Appuyez à nouveau pour libérer le gel.

Mode vidéo


Appuyez sur le bouton jaune Mode  Vidéo pour faire défiler les sept Loupe différents modes vidéo que les suivants:

- Pleine couleur
- Amélioration de l'image positive (noir sur blanc)
- Amélioration de l'image négative (blanc sur noir)
- Jaune sur fond noir
- Jaune sur fond bleu
- Bleu sur fond blanc
- Bleu sur fond jaune


Réglage de grossissement


Appuyez sur  pour faire défiler les quatre niveaux du taux de grossissement.

Gel de l'image

Appuyez sur Stop / Play bouton  pour basculer entre le gel et le gel de l'image courante.

Indication de batterie faible

Si la batterie est faible, il y aura un symbole  clignote sur le côté en haut à droite de l'écran, indiquant que vous avez pour recharger la batterie.

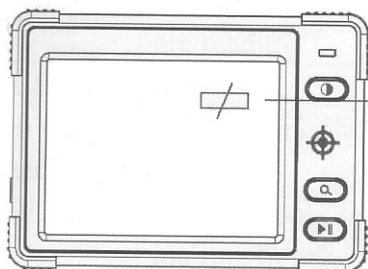


Le symbole s'affiche et clignote, indiquant batterie faible

Power Off

Allumez l'appareil en pressant bouton Power on / off (7) situé sur le côté gauche de l'appareil. Pour économiser la batterie, s'il vous plaît éteignez toujours la loupe lorsque vous ne l'utilisez pas.

Raccordement de la Loupe à un téléviseur

Si vous avez besoin de plus fort grossissement de 4,3 pouces de l'écran de la Loupe, vous pouvez connecter l'appareil à un téléviseur en mettant le câble vidéo fourni. Pour connecter votre loupe à un téléviseur, procédez comme suit.

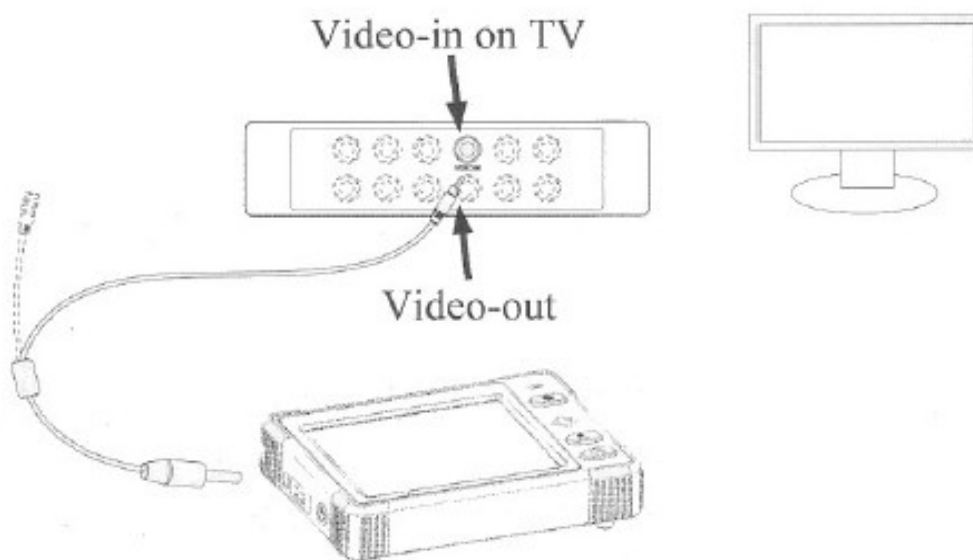

1. Insérez le 1 / 8 pouces fiche à l'extrémité du câble. Insérez le 1 / 8 pouces fiche à l'extrémité du câble vidéo en forme de Y fourni dans Puissance de l'unité / port vidéo.

2. Insérez la fiche RCA sur le câble vidéo dans l'un des jaunes de votre téléviseur connecteurs d'entrée vidéo. Se référer au manuel de votre téléviseur pour plus d'informations sur la localisation de ces connecteurs.

3. Allumez le téléviseur. Si nécessaire, mettez votre téléviseur sur le canal d'entrée approprié. En générale AV2 ou AV1. Les éléments que vous magnifier apparaissent sur l'écran de Télévision.

Remarque: Si vous voulez charger la loupe alors qu'il est connecté à un téléviseur, branchez l'adaptateur sur le connecteur de l'extrémité libre du câble vidéo.

Dépannage

Problème	Solution
L'écran est vierge.	Assurez-vous que l'appareil est allumé. Chargez la batterie. Vérifiez que l'élément que vous souhaitez agrandir est correctement positionné sous la cible.
L'appareil ne s'allume pas.	Chargez la batterie.
L'image sur l'écran est sombre et/ou déformée.	Assurez-vous que l'appareil est placé à plat sur la page que vous désirez lire.
L'indicateur de batterie LED n'est pas en rouge, même si l'adaptateur secteur est connecté et p dans une prise murale. Ou La batterie ne se recharge pas.	Branchez au port alimentation / vidéo de la Loupe. Vérifiez que la prise est sous tension et fonctionne correctement. Si la sortie est reliée à un interrupteur mural, assurez-vous que l'interrupteur est allumé.
Il ya des traces ou des taches sur l'écran	Nettoyez l'écran et la fenêtre de la caméra (située sur le bas de l'appareil).
le texte est trop petit pour être lu	Appuyez sur le bouton agrandir.
La loupe est connectée à un téléviseur, mais aucune image n'apparaît sur l'écran de télévision	Assurez-vous que le téléviseur est allumé. Basculer vers le canal d'entrée vidéo appropriée sur votre téléviseur. Assurez-vous que le câble vidéo est correctement connecté à la Loupe alimentation / vidéo et branché dans le port de la bonne entrée vidéo sur votre téléviseur.

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que vos équipements électriques et électroniques doivent être éliminés à la fin de sa vie séparément de vos déchets ménagers. Il existe des systèmes de collecte pour le recyclage dans l'UE.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter les autorités locales ou votre revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

